



Stoma
Skin
Soul



NovaLife TRE™ Urostomie
Entwickelt, damit Ihre
Haut gesund bleibt

Jim, Krebsbekämpfer

Mithilfe des NovaLife TRE™ Hautschutzes können Sie sich in Ihrer Haut wohlfühlen

So funktioniert der NovaLife TRE™ Hautschutz



- pH ist das Maß, das bezeichnet, wie sauer oder alkalisch etwas ist. Die Hautoberfläche ist von Natur aus sauer und hat einen pH-Wert von 4–6. Dies ist der sogenannte Säureschutzmantel. Er bietet der Haut ein Schutzniveau und besitzt antimikrobielle Eigenschaften, um sie gesund zu erhalten.
- Die NovaLife TRE™ Technologie ist konzipiert, um den natürlichen pH-Wert der Haut aufrechtzuerhalten.



Die Sicherheit Ihrer Stomaversorgung ist ein Thema, worüber Sie sich möglicherweise Gedanken machen. Der NovaLife TRE™ Hautschutz ist konzipiert, um eine sichere Haftung auf der Haut zu unterstützen.

- Ihnen wird die weiße Farbe des NovaLife TRE™ Hautschutzes auffallen. Ebenso werden Sie bemerken, dass der Hautschutz dünner ist im Vergleich zu unseren ursprünglichen NovaLife Basisplatten.
- Der NovaLife TRE™ Hautschutz besitzt eine hohe Haftkraft. Er ist konzipiert für Flexibilität, die natürliche Körperbewegungen ermöglicht. Dabei unterstützt er Sie bei Alltagstätigkeiten, die Ihnen Freude bereiten.



Am besten ist natürlich gesunde Haut



Absorption

Der TRE™ Hautschutz wurde zur Aufnahme von Stomaausscheidung und Schweiß entwickelt.

- Ihr Stoma hat eine feuchte Oberfläche und Ihre Haut sondert durch die Schweißdrüsen Schweiß ab.
- Im Tagesverlauf bemerken Sie eventuell, dass die weiße Farbe des Hautschutzes heller wird. Hier zeigt sich, dass Ihr Hautschutz die Feuchtigkeit aufnimmt, ohne dabei an Formstabilität und Haftfähigkeit zu verlieren.
- Der Hautschutz quillt in Bereichen mit hoher Feuchtigkeit auf. Dies kann direkt um das Stoma herum sofort erkennbar sein.





Nach der Anwendung

Sie werden feststellen, dass der Hautschutz seine Form behält und dennoch einfach zu entfernen ist, wenn es an der Zeit ist, Ihre Versorgung zu wechseln.

- Beim Entfernen des Hautschutzes werden Sie die Farbänderung erkennen, die Bereiche mit hoher Feuchtigkeit sichtbar macht. Dies kann weiß gesprenkelt aussehen.



Beim Entfernen der Versorgung sehen Sie, wie sich der flexible TRE™ Hautschutz den Körperkonturen der stomaumgebenden Haut angepasst und natürliche Körperbewegungen zugelassen hat.

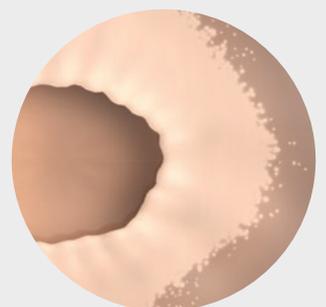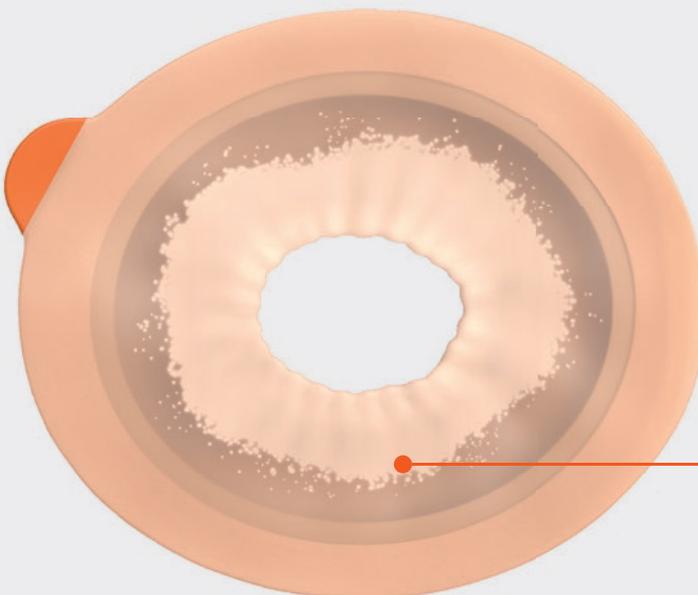

Die Farbänderung hin zu einem helleren Weiß zeigt, dass der Hautschutz Feuchtigkeit aufnimmt.

Computeranimation

Machen Sie sich weniger Gedanken über Hautprobleme dank der Unterstützung des NovaLife TRE™ Hautschutzes.



Dansac Stoma Navi – die tägliche Begleitung in der Stomaversorgung

Die App hilft Pflegekräften in der Beratung und liefert wichtige Informationen für die PatientInnen.



Dansac GmbH
Riesstraße 25
80992 München
www.dansac.de

Kontaktdaten für AnwenderInnen und Angehörige

Telefon: 0800/888 33 88 (gebührenfrei)

Mo.–Do.: 8:00 Uhr–17:00 Uhr

Fr.: 8:00 Uhr–14:00 Uhr

E-Mail: beratungsteam@dansac.com



Wohlfühlen in der eigenen Haut

Weitere Informationen oder Muster zu unseren Produkten finden Sie bei uns unter www.dansac.de

Die vorliegenden Meinungen beziehen sich auf das abgebildete Testimonial. Diese Meinungen sind repräsentativ für deren Erfahrungen, aber einzigartig und individuell für jede/n AnwenderIn. Dieses Testimonial erhielt von Dansac eine entsprechende Vergütung.

CE Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanleitung mit Informationen zu Verwendungszweck, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen.

Dansac, das Dansac Logo, NovaLife und TRE sind Markenzeichen der Dansac A/S. © 2023 Dansac A/S

dansac 